

## KIT SANGLES DE MAINTIEN POUR PLANS DURS

Kit composé de 3 sangles de maintien et une housse de transport.  
Adaptées pour une fixation des patients sur les plans durs.

### ENTRETIEN

Ne nécessite aucun entretien.

Vérification recommandée des pièces au moins une fois par mois et remplacement immédiat en cas de détérioration.

Lavage à l'eau tiède et à l'aide d'un détergent doux.

Désinfection avec un produit adapté pour le sang, si nécessaire.

Les bretelles seront réinsérées dans leur sac correspondant une fois les pièces sèches.

### MISE EN ŒUVRE

- Une fois le patient positionné sur la planche dorsale, placez chaque sangle selon le positionnement dessiné sur chacune d'elles
- Défaites le velcro de chaque sangle
- Une fois en position, tirez des deux côtés simultanément pour éviter tout déplacement du blessé



**G040036** – KIT DE SANGLES DE MAINTIEN POUR PLANS DURS